



**Návod k použití**  
**pro**  
***motion body 600 med/600 med WM***  
***a***  
***motion body 600/600 WM***



## Obsah

1	Obecné .....	3
2	Klasifikace jednotek .....	3
3	Bezpečnostní pokyny .....	3
3.1	Bezpečná instalace jednotky .....	3
3.2	Montáž modelu na stěnu .....	3
3.3	Bezpečné školení .....	5
3.4	Indikace a kontraindikace .....	6
4	Ovládání displeje .....	6
4.1	Pulzní systémy .....	6
4.2	Vícebarevné podsvícení .....	7
4.3	Přehled funkcí displeje/kláves .....	7
4.4	Zobrazit .....	8
4.5	Rychlý start .....	8
4.6	Programování na monitoru .....	8
4.7	Změna odporu .....	8
4.8	Matrice DOT .....	9
4.9	Biofeedback .....	9
4.10	Řízení pomocí paměťového média .....	9
4.11	Online školení s RFID .....	10
4.12	Výsledky .....	11
4.13	Programy kardio linky .....	12
4.14	Trénink řízený pulsem .....	18
4.12	Rozhraní PC .....	18
5	Péče, údržba a servis .....	19
5.1	Pokyny pro detekci poruchového stavu (poruchy) .....	19
5.2	Pokyny k údržbě pro obsluhu .....	19
5.3	Údržba pro autorizované specialisty .....	20
5.4	Údržba .....	20
5.5	Provádění metrologické kontroly (§ 14 odst. 1) podle MPBetreibV .....	20
6	Technické údaje .....	21
7	Záruka .....	21

## 1 Obecné



**Před prvním použitím** tréninkového zařízení si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku se všemi bezpečnostními pokyny a upozorněními, abyste zajistili bezpečné a správné používání. Tento dokument si uschovejte pro budoucí použití a v případě předání zařízení jej předejte dalším osobám.

Text s šedým pozadím označuje části textu, které se zabývají výhradně funkcemi vybavení řady fitness.

## 2 Klasifikace jednotek


- Přístroje *cardio line med* jsou zdravotnické prostředky podle směrnice 93/42 EHS, zařazené do třídy IIa. V regulačním rozsahu brzdy je přesnost zobrazení +/- 5 % nebo +/- 3 wattů pro výkony nižší než 50 W.
- Přístroje *řady cardio splňují* normy DIN EN ISO 20957-1 a DIN EN ISO 20957-5 třídy použití S (komerční použití/studio) třídy přesnosti A +/- 10 % a jsou určeny výhradně pro fitness a sportovní odvětví.

Zařízení jsou určena výhradně pro hlídané oblasti.

Najednou může se zařízením trénovat pouze 1 osoba; maximální hmotnost uživatele nesmí překročit 150 kg. Jednotky se zvýšenou přípustnou hmotností uživatele lze zatížit až 200 kg, viz typový štítek a samostatný návod.

## 3 Bezpečnostní pokyny

### 3.1 Bezpečná instalace jednotky

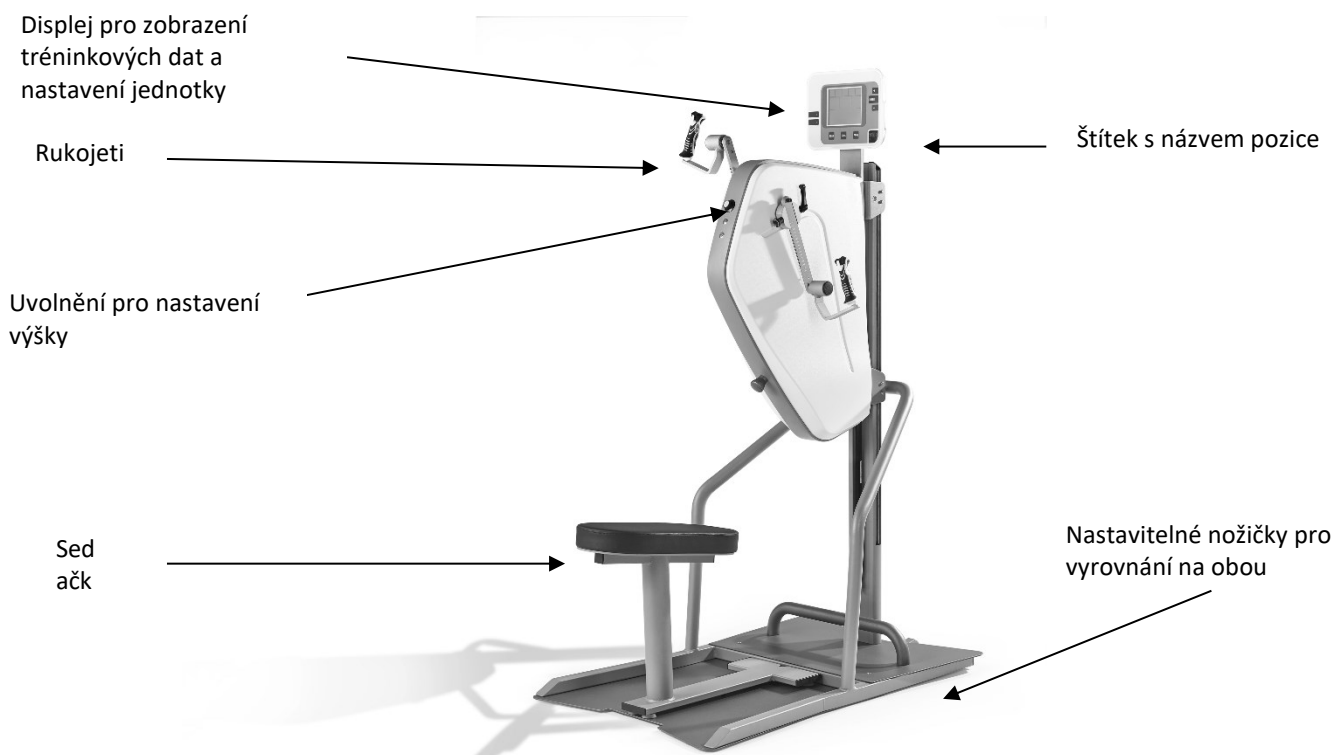

Obr.1: Pohled na jednotku s označením základních prvků

### 3.2 Montáž modelu na stěnu




Obr.2: Pohled na jednotku pro montáž na stěnu s označením základních prvků

**UPOZORNĚNÍ:** U varianty s montáží na stěnu je třeba dbát na správné a bezpečné upevnění nástěnných držáků k jednotce a ke stěně. Nejprve zkontrolujte konstrukci stěny a pouze v případě, že je stěna z betonu nebo masivního zdiva, lze dosáhnout bezpečného upevnění jednotky pomocí standardních hmoždinek.

Na jeden šroubový spoj musí být zaručeno vodorovné tahové zatížení nejméně 1000 N, aby byla pevnost zařízení trvale zachována za všech podmínek.

Opravu musí provádět specializovaná firma, která na svou práci poskytuje záruku; upevňovací materiál by měl být rovněž pořízen specializovanou firmou, aby odpovědnost zůstala v jedněch rukou. Jako příklad doporučujeme použít kotvy Fischer s dlouhou hřídelí SXRL 14x80 mm a koordinované šrouby FUS Ø 10 mm.

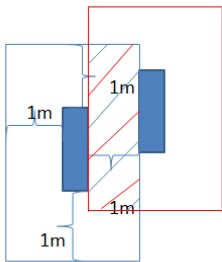

- Umístěte jednotku na pevný, rovný a neklouzávý povrch a vyrovnejte ji pomocí seřizovacích šroubů tak, aby se nekývala.
- Volný prostor kolem jednotky musí být minimálně o 1 m větší než dosah pohybu jednotky, aby byl zajištěn bezpečný přístup a únik z jednotky i v nouzových situacích. Bezpečnostní vzdálenosti se však mohou překrývat; viz obr.
- Přístroj instalujte pouze v suchých místnostech (<65% vlhkost, >0 <45°C pokojová teplota).
- Ujistěte se, že v okolí není žádné elektromagnetické záření, např. z mobilních telefonů, rádiových antén, vyzařujících zářivek apod., protože ty mohou ovlivnit měření pulzů.

• Naše zařízení OKE je nezávislé na elektrické síti. Potřebný proud pro ovládání a zobrazování zařízení je generován hybridní brzdou. Když je přístroj v klidovém stavu, převezmou napájení na 2 minuty 3 baterie AA. V případě delší přestávky přejde jednotka do režimu spánku. Baterie by měly poskytovat potřebný startovací proud po dobu přibližně 2 let. Výměna baterií viz bod 5 Péče, údržba a servis.

- **Upozornění:** Vždy dodržujte pokyny pro péči, údržbu a servis uvedené v kapitole 5 této příručky.

### 3.3 Bezpečné školení

- Před zahájením výcviku by měla být způsobilost k výcviku zkontrolována oprávněnou osobou, např. lékařem. Vezměte prosím na vědomí bod 3.3 Indikace a kontraindikace.
- Upozorňujeme, že nadměrné cvičení může být škodlivé.
- Pokud se objeví nevolnost nebo závratě, okamžitě přestaňte trénovat a poraďte se s lékařem.
- Trénink na zařízení je povolen pouze s neporušenou kůží.
- Při cvičení je vhodnější přiléhavé, lehké sportovní oblečení, které se během cvičení nemůže zachytit o části zařízení. Vždy noste vhodnou sportovní obuv pro bezpečný došlap.
- Před zahájením školení zkontrolujte, zda je přístroj bezpečně postaven nebo pevně přišroubován ke stěně, zda nemá vadné díly nebo zda s ním nelze manipulovat. Pokud zjistíte nějaké závady nebo poškození montáže na stěnu nebo si nejste jisti, zeptejte se před zahájením školení vedoucího.
- Před zahájením výcviku se ujistěte, že se nikdo nenachází v blízkosti pohyblivých částí, aby nedošlo k ohrožení třetích osob. Především je třeba zabránit tomu, aby se k zařízení dostaly děti bez dozoru.
- Tlačítko Stop je vždy aktivní jako bezpečnostní funkce a po stisknutí tlačítka zabrzdí pohyb.
- Pro správný biomechanický trénink je třeba provést nastavení stroje. U karoserie lze měnit horizontální polohu sedadla i polohu pohonné jednotky. K tomu je třeba aktivovat příslušné uvolnění. Ať už cvičíte ve stoje nebo vsedě, dbejte na to, aby ramena byla ve stejné úrovni jako hnací osa (bod otáčení).
- **Upozornění:** Systém monitorování srdečního tepu může být nefunkční. Příliš náročné cvičení může vést k nebezpečným zraněním nebo smrti. Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte cvičit.
- **Upozornění:** Přístroj smí být provozován pouze s krytem.
- **Upozornění pro volitelné připojení napájení:** Používejte pouze napájecí jednotku volitelně nabízenou společností Emotion Fitness.

### 3.4 Indikace a kontraindikace

#### Indikace

- Pohyblivost pohybového aparátu
- Posilování svalstva
- Posílení kardiovaskulárního systému

#### Kontraindikace

- Kardiovaskulární onemocnění
- Bolesti pohybového aparátu

#### Kritéria pro ukončení

- Během školení:
  - Bolest na hrudi
  - Malaise
  - Nevolnost
  - Závratě
  - Dušnost

**Pokud užíváte léky, zeptejte se svého lékaře.**

## 4 Ovládání displeje

Tři nebo deset tréninkových programů umožňuje individuální a rozmanitý trénink s *tělem med*.

Tři nebo osm školicích programů umožňuje individuální a rozmanité školení v průběhu tělo fitness linky.

### 4.1 Pulzní systémy

Všechny přístroje řady Cardio mají originální pulzní<sup>®</sup> systém Polar, u kterého se sběr signálu provádí standardně pomocí hrudního pásu (vysílač hrudního pásu není součástí dodávky). Bezdrátový přenos dat do elektroniky displeje je kódovaný. Polární<sup>®</sup> technologie je založena na přenosu signálu prostřednictvím magnetického pole. Toto magnetické pole může být narušeno mnoha faktory. Nejčastější příčinou je používání hrudních pásů, které nejsou 100%<sup>®</sup> kompatibilní se značkou Polar a z nichž některé mají velmi dlouhý rozsah. Rušit mohou také mobilní telefony, reproduktory, televizory, napájecí kabely, zářivky a výkonné motory.

Měření tepové frekvence je přesné podle EKG. Pouze při použití kódovaných hrudních pásů, jako je vysílací pás T31C, je kódovaně přenášena i tepová frekvence. Pokud používáte nekódovaný hrudní pás (T31), je přenos nekódovaný.

#### Bezpečnostní pokyny podle DIN EN ISO 20957

nepřesné. Nadměrné cvičení může způsobit vážné poškození zdraví nebo smrt. Pokud pocítíte závrať nebo slabost, okamžitě přestaňte cvičit.

### Ušní pulzní systém (volitelný)

Volitelně je k dispozici systém ušních pulzů s optickým snímáním pulzů na ušním lalůčku.


Když je zástrčka ušního snímače zapojena do monitoru, je aktivní pouze ušní impulz.

Upozornění: Důkladně si otřete ušní lalůček a teprve poté nasadte ušní senzor. Pro kontrolu

přepněte na pulzní displej. Při cvičení stiskněte 3x tlačítko skenování. Na displeji se musí v

pravidelných intervalech objevovat dlouhé pulzní signály (viz obrázek). Použití ušního

snímače tepu se u ergometru pro horní část těla doporučuje pouze v omezené míře, protože i při opatrném používání hrozí riziko, že se kabel ušního snímače zachytí o pohyblivé části ergometru a přetrhne se.

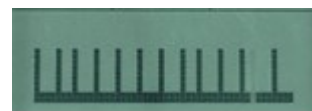

## 4.2 Vícebarevné podsvícení

Všechny kardio stroje této řady jsou vybaveny vícebarevným podsvícením LCD displeje.

Podsvícení se automaticky zapne po několika sekundách provozu ergometru a ztlumí se v závislosti na brzděném odporu.

Podsvícení zlepšuje čitelnost displeje i za nepříznivých světelných podmínek.

## 4.3 Přehled funkcí displeje/kláves




Obrázek 2: Čelní pohled na monitor, vysvětlení funkcí tlačítek

Vysvětlení tlačítek ve směru hodinových ručiček počínaje tlačítkem stop:

- Tlačítko **STOP** okamžitě zastaví trénink v kterémkoli bodě a aktivuje elektronickou brzdu, která na 8 sekund zastaví pohyb silným brzděným účinkem0, načež můžete pomocí funkce COOL provést COOL DOWN s lehkou intenzitou. Žádné výsledky se neukládají.
- Stisknutím tlačítka **PROG** se dostanete k výběru tréninkových programů, pokud nepoužíváte naprogramované paměťové zařízení.
- Pomocí tlačítka **Cool** můžete trénink předčasně ukončit, přejít do režimu COOL a dokončit trénink při nízké zátěži. Výsledky tréninku se zobrazí a uloží na paměťové médium, pokud jste s ním trénink vyvolali.
- Tlačítko **SCAN** mění zobrazení, parametry nebo grafické znázornění displeje DOT Matrix.
- **Inteligentní** klávesy mají svou funkci uvedenou v poznámkách v poli DOT Matrix.
- Tlačítko **reset**: Tlačítko reset není zpočátku pro uživatele viditelné. Nachází se v prodloužení tlačítek inteligentních kláves na horním okraji displeje. Vzhledem k trvalému napájení bateriemi je automatický reset možný pouze v omezené míře. Pokud by systém někdy pracoval nesprávně, máte možnost restartovat procesor pomocí tohoto tlačítka. Za tímto účelem stiskněte překryvné tlačítko ve výše uvedené poloze. Po stisknutí správné polohy displej na chvíli zhasne a monitor se znovu spustí se signálním tónem.
- Pomocí **tlačítka +** můžete měnit parametry nebo hodnoty výkonu.
- Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrdíte hodnoty nebo zobrazení a přejdete k dalšímu kroku programování.
- Pomocí **tlačítka -** můžete měnit parametry nebo hodnoty výkonu.

#### 4.4 Zobrazit

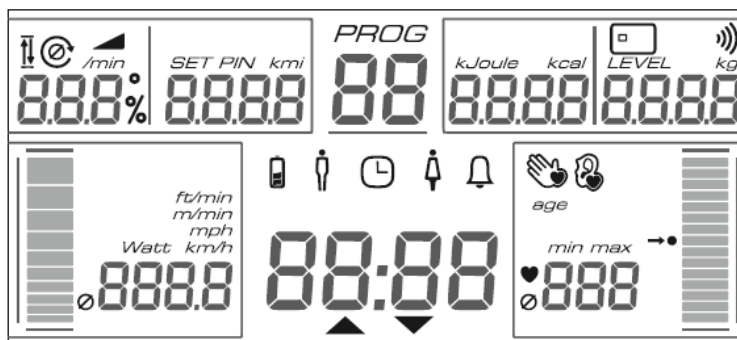

Obr.3: Na tomto obrázku jsou vidět všechny segmenty LCD displeje. Při běžném provozu se zobrazují pouze relevantní informace.

V závislosti na programu se zobrazí následující parametry:

- Program: Číslo programu
- Čas: Aktuální přidaný čas tréninku nebo zbývajcí efektivní čas tréninku. Symbol šipky ukazuje směr počítání.
- Puls: Ukazatel srdečního tepu, pokud máte na sobě pás s vysílačem tepu. Displej indikátoru pulzu jasně ukazuje, ve které pulzní zóně se nacházíte. V případě impulsu 130 je sloupcový graf vyplněn až do středu. U programů s přednastavenými pulsy představuje střed sloupcového displeje příslušnou cílovou tepovou frekvenci.
- Watt: Výkon se na displeji zobrazuje ve wattech. Souběžně s digitálním displejem se intenzita zobrazuje také v grafickém sloupcovém grafu.
- Km/h: Fiktivní rychlost se zobrazuje v km/h. Rychlost se také zobrazuje ve sloupcovém grafu. Souběžně s digitálním displejem se rychlost zobrazuje také pomocí grafického sloupcového grafu.
- Rychlost: otáčky pedálů za minutu.
- KM: V závislosti na programu se v zobrazovacím poli zobrazuje přidaná nebo zbývajcí vypočtená vzdálenost. Zobrazení je v metrech; od 1000 m po 10 m (1,00 km).
- K-Cal: V závislosti na programu se na panelu displeje zobrazuje přidaná nebo zbývajcí spotřeba kalorií.
- Úroveň: Zobrazení aktuální úrovně intenzity 1 - 21.
- Čipová karta: Po vložení paměťového média se zobrazí symbol čipové karty.
- $\emptyset$ : Pokud je tento symbol přidán k digitálním displejům, jedná se o průměrné hodnoty tréninku.

#### 4.5 Rychlý start

Panel displeje se aktivuje zahájením šlapání nebo je panel LCD zapnutý a stále napájen z akumulátoru.

Pokud jednoduše začnete trénovat, jste v programu Quickstart, ve kterém můžete trénovat bez dalších vstupů. Odpor se nastavuje v programu Quickstart pomocí tlačítek +/-.

#### 4.6 Programování na monitoru

Programování se spustí tlačítkem **Prog a** poté se pomocí +/- zvolí požadovaný program. Současně se v příslušném poli displeje zobrazí číslo programu.

**ENTER** potvrdí výběr programu. Další dotazy na ovládání příslušného programu se provádějí prostřednictvím dialogu nabídky. Hodnoty na displeji se mění pomocí +/- . Potvrzení se provádí pomocí klávesy **ENTER**. Pokud je potvrzena poslední položka, program se automaticky spustí a zobrazí se zpráva **LOS**.

#### 4.7 Změna odporu

Kromě plně automatických programů (pulsní, Kcal, watt sensitive) lze odpor kdykoli změnit ručně pomocí tlačítka +/- . V některých programech se to provádí výběrem rychlostního stupně/stupně od 1 do 21, v jiných zadáním požadovaného výkonu.



#### 4.8 Matrice DOT

V dolní polovině LCD displeje se zobrazuje vstupní dialog pro zjednodušení obsluhy v národním jazyce a navíc se graficky zobrazují wattové a pulzní křivky testů nebo tréninku. Wattové křivky se zobrazují neustále, zatímco pulzní křivky blikají. Zobrazení závisí na programu, ale lze je přepínat také pomocí tlačítka skenování.

Seznam grafických zobrazení

- Standardní - zobrazuje přibližně 5minutový výtah z tréninku.
- Přehled - zobrazuje celkový trénink do 50 minut.
- Hodnoty - velkoformátové zobrazení wattů a pulzů.
- Profil - Zobrazení profilů zatížení.
- Zone (Zóna) - Zobrazení zejména pro trénink řízený pulsem, protože se zde spolu s pulsem zobrazuje i zvolená pulzní zóna.
- Test - na displeji testu se zobrazuje chování pulzu během testu a cílová tepová frekvence, které má být dosaženo.
- Pulzní - zde se zobrazují skutečné signály podobně jako na osciloskopu.

#### 4.9 Biofeedback

Funkce biofeedbacku umožňuje uživateli zařízení vyhodnotit pomocí funkce semaforu, zda jeho trénink probíhá podle zadání.

Modrá barva pozadí vás informuje o tom, že necvičíte v optimálním rozsahu, možná jste ještě ve fázi zahřívání nebo cvičíte s příliš malým počtem otáček pedálů.

Pokud pozadí svítí zeleně, uživatel pracuje podle předvolby a nachází se v optimálním tréninkovém rozsahu.

Červená barva signalizuje překročení/nedosažení limitů - překročení zadaného tréninkového impulsu v pulzně řízených programech by tedy bylo signalizováno červeně a výkon by byl automaticky snížen. V jiných programech může být rychlost referenční hodnotou, podle které se určuje barevné kódování.



Obr.4: Vícebarevné podsvícení jako biologická zpětná vazba pro indikaci splnění cíle.

#### 4.10 Řízení pomocí paměťového média

Paměťové médium je součástí standardní výbavy všech jednotek. Ovládání prostřednictvím paměťového média slouží jako pomůcka pro obsluhu při cvičení. Doprovází a podporuje vás při všech tréninkových aktivitách.

Systém se skládá z monitorovací jednotky se čtečkou. Vložka pro médium se nachází na pravé straně monitoru. Rozpoznání paměťového média je potvrzeno akustickým signálem.

Systém ještě více usnadňuje a zefektivňuje školení s tímto zařízením. Programování média lze provádět přímo na všech typech jednotek. Výsledky jsou pak vypsány pouze prostřednictvím displeje na jednotkách.

Tréninkový plán lze vytvořit také pomocí počítačového softwaru. Jednotlivé školící programy se pak přenášejí do média. Všechny výsledky školení jsou uloženy a poté je lze analyzovat na počítači.

Volitelně může být provoz jednotek omezen na použití s paměťovými médii. Tato funkce

lze v tajné nabídce zvolit následující varianty: Provoz je povolen pouze s paměťovým médiem;

Bez paměťového média je možný pouze rychlý start; provoz s paměťovým médiem i ruční ovládání je možné.

Výchozí hodnotou je vždy legitimace pro obecný provoz s paměťovým médiem i bez něj. Pokud chcete provést omezení provozu, obraťte se na svého prodejce.

### **Vytváření tréninkových plánů na zařízení, bez softwaru pro PC**

- Posadte se na přístroj a začněte šlapat nebo aktivujte displej stisknutím tlačítka.
- Údaje o jednotlivých programech je třeba zadat ručně na přístroji. Poté se spustí program.
- Pokud se na displeji zobrazí LOS, je tréninkové médium vloženo krátce. Po detekci média vydá jednotka akustický signál.
- Vloží se klientské médium. Nyní lze nastavit maximální počet tréninkových jednotek (1 - 201) a potvrdit klávesou ENTER. Nastavení 201 jednotek odpovídá zrušení omezení.
- Po zaznění zvukového signálu se data programu uloží a klientské médium je funkční.
- Vyjměte klientské médium a znovu jej zapojte. Nyní může začít školení. Po dokončení schválených školicích jednotek je třeba načíst nový program.

Klientské médium je určeno pro jednoho účastníka školení. Po uložení požadovaného tréninkový program, médium se vloží do čtečky karet pro trénink.

Trénink nyní probíhá automaticky bez nutnosti dalšího zadávání. Všechny výsledky školení se po dokončení školení uloží na médium.

### **Zvláštní funkce tréninkového média: Odstranění dat**

Pokud chcete odstranit kompletní obsah mapy včetně tréninkového plánu, vložte do něj Dvakrát po sobě vložte tréninkové médium do čtečky čipových karet. Pak vložte své klientské médium a všechna data na zákaznickém médiu jsou odstraněna. Pokud je karta zákazníka vložena do čtečky čipových karet, zobrazí se následující obrazovka.

Platnost karty vypršela"

Jakmile je vložena karta zákazníka, lze "Celkový výsledek" vymazat i bez karty trenéra, současným stisknutím tlačítek + a - po dobu přibližně 3 sekund. Pouze

Výsledky smazány, ale ne tréninkový plán.

### **Jak členská karta funguje**

Posadte se na přístroj a začněte šlapat. Vložte naprogramované médium.

Zobrazí se součet tréninkových výsledků všech kardio strojů (celkem) a výsledků aktuálně používaného stroje. se zobrazí na 4 sekundy. Můžete si tak prohlédnout své kumulativní nebo průměrné tréninkové výsledky.

Poté se automaticky vyvolá váš osobní trénink a může začít individuální trénink.

Médium odstraňte až po ukončení tréninku nebo po jeho zrušení tlačítkem COOL.

byla provedena. Zobrazí se zpráva "Write result".

Výsledky tréninku se okamžitě zobrazí na displeji. Stejně tak jsou všechny výsledky k dispozici na uložené na médiu.

### **4.11 Online školení s RFID**

Volitelně lze jednotky vybavit čtečkou RFID (Mifare, Hitag, Legic - pozor: uveďte při objednávce).

Dbejte na správnou specifikaci, protože kompatibilitu lze zjistit pouze s odpovídající čtečkou.

(Lze vybavit). Tato online varianta se ovládá pomocí kompatibilního softwaru pro PC.

V závislosti na médiu RFID existují různé způsoby zahájení školení.

Pokud pracujete s kartou RFID, vložte ji do čtečky. Nyní může začít školení. Na adrese .

Na displeji se zobrazí "LOS".

Pokud se používá náramek, je třeba stisknout tlačítko RFID a poté

náramek je přiložen k tlačítku RFID. Nyní může začít školení. Na displeji se zobrazí "LOS".

Použití jiného média než karty RFID musí být známo před dodáním, protože zde musí být provedeno jiné výchozí nastavení.



Obr.5: Tlačítko RFID pro detekci RFID, pokud není vloženo médium mohou nebo by měly

Pokud se na displeji opakovaně zobrazí zpráva "plugged in again", lze stisknout tlačítko SCAN, aby se na displeji zobrazilo konkrétní chybové hlášení.

#### 4.12 Výsledky

Po ukončení školicího programu se zobrazí krátká výzva s dotazem, zda má být ke školení připojen COOL-Down, nebo zda má být školení okamžitě ukončeno. Stisknutím tlačítka se uživatel rozhodne pro jednu nebo druhou možnost. Pokud nedojde k žádné reakci, trénink se po zobrazení výsledků ukončí. Trénink lze kdykoli zastavit stisknutím tlačítka COOL.

Výsledky se zobrazují jak na displeji parametrů, tak v maticovém poli. Částečně se hodnoty průměrují (Watt, Km/h, otáčky, puls), částečně se kumulují (Km, K-Cal, čas). Průměrné hodnoty jsou označeny symbolem  $\emptyset$ .

Tyto výsledky umožňují sledovat vývoj osobního výkonu a slouží tak jako motivace.

Pokud trénujete pomocí paměťového média, výsledky každého tréninkového zařízení jsou na médiu uloženy samostatně. Odečet výsledků lze provést na zařízení nebo na počítači, pokud je k dispozici příslušný software.

#### 4.13 Programy kardio linky

Programy	pohybové ústrojí 600 med/600 WM			
Provozní možnosti	Ruční výběr	Paměťové médium	Ovládání pomocí softwaru pro PC	Funkce biofeedbacku
1 Rychlý	x	x	x	-
2 Watt	x	x	x	-
3 W citlivé*	x	x	x	x
4 Puls	x	x	x	x
5 Izokinetika*	x	x	x	x
6 Terapie*	x	x	x	x
7 Interval*	x	x	x	x
8 K-cal*	x	x	x	x
9 kopců*	x	x	x	-
10 Náhodný výběr*	x	-	-	-
11 Vzdálenost*	x	x	x	-

**Tab. 1: Programy *cardio line med* podle přístrojů, provozu a biofeedbacku (volitelné programy jsou označeny \*).**

Programy	pohybové ústrojí 600/600 WM			
Provozní možnosti	Ruční výběr	Paměťové médium	Ovládání pomocí softwaru pro PC	Funkce biofeedbacku obecně (kromě běžeckého pásu)
1 Rychlý start	x	x	x	-
2 Kvalifikace	x	x	x	-
3 Pulzní trénink	x	x	x	x
4 Kalorický trénink*	x	x	x	x
5 Trénink na kopci*	x	x	x	-
6 Náhodný trénink*	x	-	-	-
7 Intervalový trénink*	x	x	-	x
8 Trénink protahování*	x	x	x	-
9 Silový trénink*	x	x	x	x

**Tab. 2: Programy *cardio line* podle vybavení, provozu a biofeedbacku (volitelné programy jsou označeny \*).**

## Specifikace programu

### Rychlý/rychlé spuštění

Program vám umožní zahájit výcvik okamžitě. Začněte šlapat, displej se rozsvítí a vyvolá se rychlý start. Žádné další kroky programu nejsou nutné.

Tlačítka +/- lze měnit úroveň - tedy intenzitu - v průběhu tréninku.

Program pracuje v závislosti na rychlosti, tj. výkon se mění v závislosti na rychlosti.

Tlačítko skenování slouží ke změně zobrazení nebo grafického znázornění.

Program se ukončí stisknutím tlačítka Cool Down a zobrazí se výsledky tréninku.

### Školení Watt/Time

Program řídí výhradně délku tréninku a funguje nezávisle na rychlosti, tj. výkon zůstává s rostoucí rychlostí konstantní.

Po aktivaci displeje je volba programu přístupná tlačítkem Prog. Pokud zvolíte odpovídající trénink, předvolíte pomocí +/- délku tréninku v minutách a potvrdíte tlačítkem ENTER. Navrhovaná počáteční zátěž je vždy ve watech a lze 25ji kdykoli změnit v krocích po 5 watech pomocí tlačítek +/- . Pokud jsou otáčky příliš nízké na to, aby generovaly nastavený výkon/watt, displej otáček bliká.

Po ukončení tréninku nebo po jeho přerušení tlačítkem COOL se na displeji zobrazí příslušné výsledky.

### Pulsní trénink

Pulsní trénink je velmi inteligentní tréninkový program, který zaručuje optimální dávkování tréninku bez nutnosti manuálního zásahu. Na začátku se nastaví požadovaná cílová tepová frekvence - v závislosti na tréninkovém cíli - a přístroj pak řídí odpor tak, aby bylo této tepové frekvence dosaženo, ale nebyla překročena. Kromě toho je program schopen vyhodnotit úroveň výkonu na základě vývoje pulsu, aby optimálně přizpůsobil další řízení programu, zejména zahřívací fázi.

Pokud je počáteční zátěž nastavena nad určitou hranici výkonu, fáze zahřívání se přeskočí a zátěž se okamžitě upraví podle požadované frekvence pulzů.

Tento program pracuje v režimu nezávislém na rychlosti.

Pro pulzní program je třeba zadat následující parametry:

- Tréninkový puls
- Počáteční zatížení ve watech
- Délka výcviku v efektivním rozsahu

Vše ostatní se provádí pomocí řízení programu. Zadaná doba tréninku se vztahuje k efektivní době tréninku, během níž je tepová frekvence v definovaném cílovém pulzním rozsahu, tj. do měření času se nezapočítává doba zahřívání.

Tlačítka +/- jsou během tréninku vždy aktivní. Pokud se počáteční zátěž během prvních 2 minut zvýší na více než 50 wattů, dojde k okamžitému postupnému zvyšování, aby se co nejrychleji dosáhlo efektivního pulzního rozsahu. Tímto způsobem existuje možnost křížového tréninku (vytrvalostní trénink na různých kardio strojích), kdy je odpor nastaven na očekávaný výkon a ergometr přebírá pouze jemnou gradaci v rozsahu cílového pulsu.

V tomto programu je aktivní funkce biofeedback, která trenérovi a cvičenci zobrazuje překročení/pokles pod cílové rozmezí tepové frekvence.

Jakmile je dosaženo cílového rozsahu pulzů, slouží tlačítka +/- ke změně cílového pulzu.

Na konci tréninku se na displeji zobrazí výsledky.

### **K-cal/kalorický trénink**

Trénink K-cal je přizpůsoben potřebám studií a jejich členů, kteří stále častěji využívají vytrvalostní trénink k podpoře snižování hmotnosti. Aby se při tréninku využil požadovaný metabolismus, řídí se program podle nastavené tepové frekvence. Výkonnost se pozná podle délky tréninku potřebné ke spálení určitého počtu kalorií při konstantní tepové frekvenci.

V tomto programu je aktivní funkce biofeedback, která trenérovi a cvičenci zobrazuje překročení/pokles pod cílové rozmezí tepové frekvence.

Výsledky tréninku se zobrazí na displeji na konci tréninku.

### **Trénink na kopci/do kopce**

Trénink do kopce je závislý na rychlosti a kombinuje konstantní aerobní a mírně anaerobní intervalový trénink. Během programování se předem zvolí požadovaná doba tréninku a úroveň zátěže. Během celého tréninku jsou aktivní tlačítka +/-, kterými lze měnit odpor.

Grafický displej profilu zobrazuje přednastavený profil kopce a pozici v rámci tréninkového programu. Intenzita se trvale zobrazuje prostřednictvím úrovně nebo wattu.

Tepová frekvence se zobrazuje při nošení hrudního pásu nebo při dotyku snímačů úchopu a slouží k osobní kontrole, ale nemá žádný vliv na řízení programu.

Po skončení programu se automaticky spustí ochlazování, které rovněž aktivuje zobrazení výsledků.

**Náhodný trénink** Náhodný trénink poskytuje širokou škálu tréninkových profilů. Funguje v závislosti na rychlosti a kombinuje konstantní aerobní a mírně anaerobní intervalový trénink.

Během programování se předem zvolí požadovaná doba tréninku a úroveň zátěže. Během celého tréninku jsou aktivní tlačítka +/-, kterými lze měnit odpor.

Grafický displej profilu zobrazuje přednastavený profil kopce a pozici v rámci tréninkového programu. Intenzita se trvale zobrazuje prostřednictvím úrovně nebo wattů/tempa. Tepová frekvence se zobrazuje při nošení hrudního pásu nebo prostřednictvím snímačů úchopu a slouží k osobní kontrole, ale nemá žádný vliv na řízení programu.

Po skončení programu se automaticky spustí ochlazování, které rovněž aktivuje zobrazení výsledků.

## Intervalový trénink

Intervalový trénink funguje nezávisle na rychlosti. Trénink lze rozdělit do 22 částí/oddílů, z nichž každý je pak definován samostatně z hlediska intenzity, délky tréninku a dalších parametrů. Úrovně intenzity libovolné délky se zpravidla řadí za sebe. Při změně intenzity se upraví příkon.

K dispozici je také možnost zvýšení intenzity pomocí rampy. V tomto případě je nárůst zatížení plynule upravován až do konce kroků.


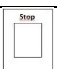
Pro zjednodušení programování intervalů můžete sekvenci zatížení a pauzy opakovat libovolný početkrát - např. "Loop" x 5 -. (max. 22x). V pravé horní části displeje se zobrazuje, kolik paměťových kroků je ještě volných. Počítá se pozpátku od 22. Pokud je vytvořeno více než 20 kroků, zapíše se na kartu pouze prvních 22 kroků.

Pomocí počítačového softwaru mtmCUBE lze snadněji vytvářet individuální intervalové tréninkové programy. Pomocí čipové karty nebo bezdrátové sítě lze zákaznické programy snadno přenášet do příslušného monitoru; výsledky se samozřejmě automaticky přenášejí zpět na čipovou kartu nebo přímo do softwaru.

Na displeji monitoru najdete následující symboly, které slouží k ručnímu programování intervalového programu.

Indikátor smyčky: indikuje, že chcete násobit intervalovou sekvencí.	Tento symbol zahajuje a ukončuje programování intervalové sekvence.	Plynulé zvyšování zátěže v průběhu trvání fáze.	Postupné zvyšování zátěže	Ukončení intervalového programování

Symbol	Příkazový řádek	Rozsah hodnot	Vstupní akce
			Monitor aktivujte sešlápnutím nebo stisknutím tlačítka.
	Stiskněte tlačítko PROG		
	Výběr programu pomocí +/-	Interval	→ ENTER
Programování krokové sekce			
	Výběr krokového nebo rampového režimu		Výběr pomocí +/-, → ENTER
	Watt	0 - 500	Výběr pomocí +/-, → ENTER
	Rychlost - otáčky za minutu	0 - 200	Výběr pomocí +/-, → ENTER
	Doba školení	10sec.- 40min	Výběr pomocí +/-, → ENTER
Výběr krokového nebo rampového režimu nebo chcete znásobit další posloupnost kroků			
	Vyberte funkci pomocí +/- Enter →, zobrazí se		
	Výběr krokového nebo rampového režimu		Výběr pomocí +/-, → ENTER
	Watt	0 - 500	Výběr pomocí +/-, → ENTER
	Rychlost - otáčky za minutu	0 - 200	Výběr pomocí +/-, → ENTER
	Doba školení	10sec.- 40min	Výběr pomocí +/-, → ENTER
Etapa je definována, následuje další etapa			
	Výběr krokového nebo rampového režimu		Výběr pomocí +/-, → ENTER
	Watt	0 - 500	Výběr pomocí +/-, → ENTER
	Rychlost - otáčky za minutu	0 - 200	Výběr pomocí +/-, → ENTER
	Doba školení	10sec.- 40min	Výběr pomocí +/-, → ENTER
	Pokud chcete poslední kroky opakovat, stiskněte znovu tlačítko LOOP a v dalším kroku zadejte počet opakování.		

	Symbol  zmizí
Byla naprogramována sekvence o dvou krocích. Nyní lze naprogramovat další kroky nebo sekvence.	
	Pokud chcete programování dokončit, vyberte obdélník na pravé straně a potvrďte jej klávesou ENTER.
	Jste si jistý? Ano. <span style="float: right;">Potvrďte tlačítkem ENTER</span>

Zadání osobních parametrů pro určení maximální tepové frekvence Vzorec: $220 - \text{věk} = \text{max. puls}$		
Věk	15 - 90	Výběr pomocí +/-, → ENTER
Max. Pulsní	90 - 220	Výběr pomocí +/-, → ENTER
Programování intervalů je nyní dokončeno. Na displeji se zobrazí LOS		

Chcete-li zapsat definici programu na médium, postupujte takto:		
Vkládání a vyjímání tréninkového média		
Vložte klientské médium		
Počet jednotek	1 - 201	Výběr pomocí +/-, → ENTER
Zadáním hodnoty 201 se limit zruší; uložený program lze použít libovolně často. Toto programování se zvolí, pokud se program nepoužívá samostatně. Klientské médium používají různí klienti, kteří chtějí dokončit stejný program. V tomto případě ignorujte výsledky na médiu.		
Na displeji se krátce zobrazí zpráva .... Napište program.... Data jsou uložena na médiu.		
Klientské médium lze nyní použít ke školení. Po vložení se nejprve zobrazí uložené výsledky tréninku a poté se vyvolá definovaný intervalový trénink.		
Pomocí tlačítek +/- můžete měnit intenzitu v jednotlivých úrovních.		
Tlačítko SCAN lze použít k vyvolání různých zobrazení na displeji. Zobrazení profilu Ukazatel rychlosti Pulzní displej Graf watt + puls		
Tlačítko COOL zruší program a uloží výsledky.		



### **Distanční/protahovací trénink**

Trénink na vzdálenost/úsek funguje v závislosti na rychlosti, tj. výkon se mění v závislosti na rychlosti.

Pro program jsou předem zvoleny parametry tréninkové vzdálenosti a intenzity nebo úrovně převodů. Během tréninku lze kdykoli nastavit převod pomocí +/- . Zvolená vzdálenost se zpětně odpočítává a individuálně se mění pomocí 21 stupňů intenzity. Fiktivní vzdálenost se na displeji zobrazuje v km. Čas potřebný k překonání vzdálenosti lze vyhodnotit jako celkový výkon tréninku.

Po dokončení programu se na displeji zobrazí výsledky.

### **Izokinetika / silový trénink**

Izokinetický/silový trénink je variací v oblasti ergometrického tréninku. Je nastavena cílová rychlost, při které je dodáváno celkové spektrum výkonu. Uživatel si sám určuje odolnost intenzitou svého působení. Při nízkých rychlostech se lze zaměřit na silový trénink. Intenzitu tréninku určuje uživatel. To je užitečné zejména pro cvičence, kteří mají omezenou schopnost cvičit kvůli zranění kolena.

Funkce biofeedback indikuje dosažení/překročení nastavené cílové rychlosti.

### **Watt sensitive (není k dispozici pro fitness zařízení)**

Tréninkové programy s konstantním výkonem se často používají pro kontrolu tréninku a terapii, protože intenzitu lze velmi přesně řídit. Pokud nejsou pro terapii ortopedické důvody, má regulace výkonu ergometrů nezávislá na rychlosti mnoho výhod a je přirozenou volbou. Pokud se však vyskytnou problémy v dolních končetinách, regulace výkonu nezávislá na rychlosti často vede k přetížení. Snížení rychlosti způsobí prudký nárůst tlaku na pedál a vede k přetížení nebo ukončení programu. K eliminaci těchto negativních aspektů využívá program Watt sensitive inteligentní řízení programu, které zabraňuje nadměrnému točivému momentu. Při zadávání programu se zadá rychlostní limit, pod kterým se odpor pedálu silně sníží.

Překročení nastavené tepové frekvence je rovněž monitorováno, a pokud je tepová frekvence překročena po delší dobu, je výkon snížen o 10 % v 30sekundových intervalech.

Tréninkový výkon je stupňován po dobu 2 minut, aby si cvičenec mohl zvyknout na zátěž a byla zaručena dostatečná zahřívací fáze.

Funkce biofeedback je v tomto programu aktivní a ukazuje dosažení cíle ve vztahu k nastavené rychlosti tréninku.

### **Terapie (není k dispozici s fitness zařízením)**

Také při terapii se celková zátěž tréninku řídí podle průběhu zotavování pomocí tréninkových řídicích faktorů - objemu a intenzity. Úprava zátěže se zpravidla provádí zvýšením intenzity (např. zvýšením počtu wattů). Při terapeutickém tréninku se intenzita v rámci programu několikrát mění. Po dvouminutové zahřívací fázi ve formě rampy následuje 6 intervalů po jedné minutě zátěže s jednou minutou aktivního odpočinku při přibližně 50% intenzitě zátěže. Maximální intervalové zatížení ve wattech je předdefinováno, stejně jako rychlostní limit, pod kterým se síla šlapání výrazně sníží. Kromě toho se sleduje překročení nastavené tepové frekvence, a pokud je tepová frekvence překročena po delší dobu, sníží se výkon o 10 % v 30sekundových intervalech.

Trénink zakončuje tříminutová funkce ochlazení. Program trvá celkem 17 minut.

Funkce biofeedback je také indikátorem dodržování stanoveného rozsahu rychlosti v tomto programu.

#### **4.14 Trénink řízený pulsem**

Informace o tom, jak fungují tréninkové programy řízené impulsem, naleznete v brožuře "motion pulse manager", kterou si můžete vyžádat u výrobce.

#### **4.12 Rozhraní PC**

Všechny ergometry jsou vybaveny rozhraním RS 232 - bez galvanického oddělení. To umožňuje ovládání pomocí počítače, EKG, spirometru atd., pokud zařízení používají stejný protokol.

Upozorňujeme, že při použití ve zdravotnictví je nutné dodržovat elektrickou bezpečnost.

Rozhraní RS232 může být volitelně vybaveno galvanickým oddělením, takže v případě poruchy zařízení připojených k ergometru nehrozí žádné nebezpečí. V případě dotazů se obraťte na poradce MP u svého prodejce.

Rozhraní, které není galvanicky odděleno, lze v lékařství používat pouze s přístroji schválenými pro lékařské účely, které zaručují bezpečnost datového vedení. Z bezpečnostních důvodů je zástrčkové připojení rozhraní utěsněno. Ochranný kryt lze sejmout pouze pomocí nářadí.

Pokud má být monitor trvale zapnutý - i před zahájením tréninku/testu - je třeba pro tento účel zakoupit pouze napájecí jednotku nabízenou společností emotion fitness.

Po připojení zdroje napájení se displej rozsvítí na 3 minuty, poté je v pohotovostním režimu a stisknutím tlačítka je okamžitě připraven k provozu.

V případě dalších dotazů se obraťte na poradce MP vašeho prodejce.

## 5 Péče, údržba a servis

Všechna kardio zařízení od emotion fitness se vyznačují vynikající kvalitou. Jsou odolné a nevyžadují velkou údržbu, aby mohly dlouho sloužit jako tréninkové vybavení. Je však nutné, aby byla nezbytná péče prováděna svědomitě.

**Upozornění:** Příklad smí otevírat pouze odborník.



Obr.6: Výstražné upozornění na brzdě kvůli nebezpečí vysokého napětí.

Úroveň bezpečnosti jednotek lze udržet pouze tehdy, pokud jsou jednotky pravidelně kontrolovány z hlediska poškození a opotřebením. Vadné díly musí být okamžitě vyměněny a jednotka musí být až do opravy odstavena.

### 5.1 Pokyny pro detekci poruchového stavu (poruchy)

Pokud se na zařízení vyskytnou závady, které nelze klasifikovat, obraťte se na společnost emotion fitness GmbH & Co.KG. U každého chybového hlášení byste si měli připravit sériové číslo a typ modelu vadného zařízení, protože to může být důležité pro stanovení správné diagnózy a především pro zajištění vhodných náhradních dílů!

### 5.2 Pokyny k údržbě pro obsluhu

Před každým použitím nebo alespoň denně přístroj vizuálně zkontrolujte a věnujte zvláštní pozornost vadným dílům, uvolněným spojům a netypickým zvukům.

Navzdory vynikajícímu systému kvality musíte u zdravotnických prostředků se schválením provádět každých 6 měsíců následující kontroly a zdokumentovat je v příručce k výrobku:

- Vizuálně zkontrolujte všechny viditelné spoje a svary.
- Jednotku důkladně vyčistěte.
- Zkontrolujte těsnost všech šroubových spojů.
- Zkontrolujte neporušenost nastavení výšky.
- Zkontrolujte neporušenost a pevnost rukojetí a klik.

Obecně řečeno:

- Plastové obložení a části rámu pravidelně podle potřeby čistěte vlhkým hadříkem a jemným mýdlem, abyste odstranili agresivní zbytky potu. Poté je znovu otřete do sucha.
- Použití lahví s čisticími prostředky ve spreji není povoleno; bylo prokázáno, že jednotky na nepřístupných místech nikdy nevysychají. Tímto postupem nelze vyloučit napadení rzi.
- Dbejte na to, aby se do krytu monitoru nedostala žádná kapalina, protože by mohlo dojít k poškození citlivých elektronických součástek.
- Pro případnou dezinfekci zařízení používejte pouze dezinfekční ubrousky acryl-des® (<http://www.schuelke.com/>).
- Na displeji monitoru se může zobrazit příliš nízké napětí akumulátoru, při kterém nelze bezpečně zaručit funkci bez brzděného proudu. Poté vyměňte 3 baterie AA uvolněním 4 spojovacích šroubů obou polovin krytu monitoru, otevřete kryt monitoru a vyměňte baterie v přední polovině krytu. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy podle pokynů. Vybité baterie zlikvidujte v souladu s právními předpisy. Existuje povinnost zpětného odběru; zákazník si může vybrat, zda baterie odevzdá k bezplatné likvidaci regionálnímu likvidátorovi nebo distributorovi spotřebičů.
- Dbejte na to, aby jednotky nestály na silných gumových podložkách, do kterých se rámy vtlačují. Spodní strana rámu musí být vždy větraná.
- Zkontrolujte těsnost upevňovacích prvků krytu.

- V případě pravidelného tréninkového provozu doporučujeme pravidelně vizuálně kontrolovat všechny části zařízení, zejména šrouby, svorníky, sváry a další upevňovací prvky.
- Zkontrolujte, zda jsou nožičky spotřebiče pevně usazené.
- Zkontrolujte neporušenost nastavení výšky.
- Zkontrolujte, zda jsou kliky stále pevně spojeny s osou. K tomu budete potřebovat nástrčný klíč 14 mm.
- Důležité: Po prvních 10 hodinách používání znovu utáhněte! Na poškozené kliky a osy v důsledku uvolnění klik se záruka nevztahuje!
- Používejte pouze originální náhradní díly, v tomto ohledu nás prosím kontaktujte.

**Upozornění:** Znovu utáhněte kliky a rukojeti.

Po prvních 10 hodinách provozu je třeba kliky a rukojeti dotáhnout.

Pokud nejsou dotaženy, může dojít k poškození osy, klik nebo rukojetí a v takovém případě již neplatí záruka.

### 5.3 Údržba pro autorizované specialisty

V případě problémů se zařízením, které nemůžete vyřešit sami jednoduchým způsobem, se vždy obraťte na službu emotion fitness. Autorizovaný servis vám rychle a kvalifikovaně pomůže nebo vám poskytne pokyny.

### 5.4 Údržba

Společnost Emotion Fitness předepisuje **údržbu/bezpečnostní kontrolu (§ 7MPBetreibV údržba)** všech zdravotnických trenažérů s kontrolou bezpečnostně relevantních součástí pověřenými zaměstnanci/partnery každý **měsíc.12**

### 5.5 Provádění metrologické kontroly (§ 14 odst. 1) podle MPBetreibV

Metrologické kontroly nejsou pro fitness zařízení předepsány ani relevantní.

U **klikových ergometrů** (pedálových a ručních) je pro obsluhu povinná metrologická kontrola (**§1 4MPBetreibV MTK** (příloha 2)), pokud je ergometr používán pro "definované fyzické a reprodukovatelné zatížení pacientů" (tj. s **wattovým displejem**).

Všechny klikové ergometry emotion fitness mají wattový displej, a proto musí být zkontrolovány měřením nejpozději po **24 měsících nebo po** opravě/výměně součástí, které ovlivňují výkon.

V případě nehod/nehod, i když nebyly způsobeny nepřesnými specifikacemi výkonu, nese odpovědnost provozovatel.

**Za dodržování zákonných požadavků odpovídá provozovatel!**

Tento oddíl se týká právní situace v Německu. Ověřte si, prosím, platné zákony pro provoz zdravotnických prostředků ve vaší zemi.

## 6 Technické údaje

- Informace o rozměrech a hmotnosti, všechny hodnoty se mohou lišit v důsledku změn v jednotce.

Rozměry	Hmotnost	Max. Hmotnost uživatele
116 cm x cm 77x 155 cm (D/Š/V) 65 cm x 56 cm x 150 cm (d/š/v) WM	108 kg 47 kg	150 kg; posílená: 200 kg

- Odporový systém: brzdový systém nezávislý na síti
- Vyrovnávací baterie: 3 x AA - Mignon článek
- Rozsah výkonu medicíny: 15 - 500 wattů / nezávislý na rychlosti (15-500 wattů / závislý na rychlosti)
- Rozsah fitness výkonu: 25 - 500 wattů / nezávisle na rychlosti (25-500 wattů / závisle na rychlosti)
- Volnoběh: NENÍ přítomen
- Jsou splněny následující směrnice EU:  
DIN EN ISO 20957-1 SA  
DIN EN ISO 20957-5 SA  
DIN EN 60601-1; 60601-1-2  
2001/95/ES Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků  
93/42/EHS Směrnice o zdravotnických prostředcích (splněno pouze u prostředků s koncovkou med)
- Vyhradzujeme si právo na technické a optické změny a tiskové chyby.



## 7 Záruka

To vychází ze zákonné záruky.

emotion fitness GmbH & Co. KG jako distributor tohoto výrobku poskytuje profesionálním uživatelům bezplatný servis po dobu 12 měsíců na díly a práci, pokud prokáží správné používání a péči uvedenou v tomto návodu k použití. Po dobu dalších 12 měsíců bude společnost emotion fitness GmbH & Co. KG poskytovat náhradní díly zdarma.

Nárok na záruku zaniká, pokud byl výrobek servisován nebo opravován neoprávněnými osobami. Jakmile se vyskytne záruční případ, měli byste o tom neprodleně písemně nebo e-mailem informovat společnost emotion fitness GmbH & Co KG. Majitel zařízení musí poskytnout informace o sériovém čísle zařízení, době nákupu, podrobném popisu závady a zdroji napájení.

emotion fitness GmbH & Co KG zajistí službu, ale vyhrazuje si právo určit její povahu.

V úvahu přicházejí následující postupy.

1. službu provádí náš servis přímo na místě.
2. zašleme požadovaný náhradní díl.
3. zašleme náhradní jednotku.

Vadné díly nám musí zákazník vrátit do 48 hodin. V opačném případě budou dodané náhradní díly účtovány. Pokud příčina leží mimo rámec záruky, vyhrazuje si společnost emotion fitness GmbH & Co. KG právo účtovat veškeré náklady na opravu.

Na některé opotřebitelné díly se záruka nevztahuje. Jedná se zejména o překryvnou fólii/fólii na klávesnici, sedlo, kliky a jejich uchycení, pedály, poutka na pedály, baterie, nášlapy, potahové látky a gumové úchyty na řídítkách. Na pulzní systémy Polar se vztahuje zákonná záruka.

Tato ustanovení o záruce se nijak nedotýkají obecných zákonných nároků.

Naše Všeobecné dodací podmínky, ve znění pozdějších změn, si můžete prohlédnout a stáhnout z našich webových stránek [www.emotion-fitness.de](http://www.emotion-fitness.de).

**Děkujeme vám za důvěru!**



**emotion fitness GmbH & Co KG**

**Trippstadter Str. 68**

**67691 Hochspeyer**

**Tel 06305-71499-0**

**Fax 06305-71499-111**

[info@emotion-fitness.de](mailto:info@emotion-fitness.de)

[www.emotion-fitness.de](http://www.emotion-fitness.de)

**Výrobce EUDAMED SRN: DE-MF-000016584**